

Test pour la détection de la grossesse à domicile

MODE D'EMPLOI

VEUILLEZ LIRE TOUS LES RENSEIGNEMENTS DE CE FEUILLET AVANT DE FAIRE LE TEST.

Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le carton. Entreposer dans un endroit sec sous 30 °C (86 °F). Ne pas congeler. Garder hors de la portée des enfants. Pour utilisation diagnostique in vitro. Ne pas avaler. Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS DÉSIREZ DISCUTER DE VOS RÉSULTATS.

COMPOSEZ SANS FRAIS LE 1-800-268-3186, L-V 7 h à 17 h HE.

Quand utiliser le test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSEME

Le test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSEMC est si sensible que la plupart des femmes ont assez d'hormone de grossesse, la GCh (gonadotrophine chorionique humaine), pour que le test la décèle aussi tôt que 6 jours avant vos règles manquées (5 jours avant le jour prévu des règles). Vous pouvez utiliser le test de grossesse à résultat précoce PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} à n'importe quel moment de la journée. Vous n'avez pas à utiliser la première urine du matin. Toutefois, votre première urine du matin contient généralement le plus haut taux d'hormone de grossesse.

Remarque importante concernant les résultats négatifs: certaines femmes enceintes ne pourront pas déceler la GCh dans leur urine 6 jours avant leurs règles manquées (5 jours avant le jour prévu des règles). Si votre test est négatif avant vos règles manquées et si vous crovez que vous pourriez tout de même être enceinte, vous devriez refaire le test quelques jours après vos règles manquées. Tous les résultats doivent être confirmés par votre professionnel des soins de santé surtout lorsqu'il faut prendre des décisions concernant des soins médicaux à venir.

Remarque importante concernant les résultats positifs : comme ce test décèle des taux bas de GCh, il est possible que ce test vous donne des résultats positifs même si vous n'êtes pas enceinte. Si votre test est positif et si vous croyez que vous pourriez ne pas être enceinte, vous devriez consulter votre médecin.

MODE D'EMPLOI

 Après avoir lu l'encart, et lorsque vous êtes prête à faire le test, retirer le bâtonnet du test de l'enveloppe en papier d'aluminium et retirer le capuchon.



ÉTAPE 1



 En tenant le test par la prise pour le pouce, pointez la tige absorbante vers le bas, et dirigez la fenêtre de résultat de l'autre côté par rapport à votre corps, placez la tige absorbante dans le jet de votre urine pendant 5 secondes seulement



 Vous pouvez aussi recueillir votre urine dans un récipient sec et propre et immerger la tige absorbante au complet dans l'urine pendant 5 secondes seulement



LECTURE DU RÉSULTAT – LISEZ VOTRE RÉSULTAT APRÈS 3 MINUTES **ENCEINTE**

ÉTAPE 2

· La tige absorbante pointant toujours vers le bas, replacez le capuchon et posez le test sur une surface plane non-absorbante, la fenêtre de résultat dirigée vers le haut.

• Vous ne tarderez pas à voir une couleur rose se déplacer à travers la fenêtre de résultat pour indiquer que le test fonctionne.

· Attendez 3 minutes avant de lire les résultats.

ÉTAPE 3



DEUX LIGNES ROSES dans la fenêtre de résultat Une ligne peut être plus pâle que l'autre. L'aspect des résultats peut varier.

> PAS ENCEINTE **UNE SEULE LIGNE** ROSE dans la fenêtre de résultat.



QUESTIONS ET RÉPONSES

- O: Comment le test fonctionne-t-il?
- R: Le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSEMC résultat précoce décèle l'hormone que votre corps fabrique durant la grossesse, la GCh (gonadotrophine chorionique
- Q: Quand puis-je tester avec le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSEMC résultat précoce?
- R: Le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSEMC est concu pour déceler la GCh aussi tôt que 6 jours avant vos règles manquées (5 jours avant la date prévue de vos règles). La quantité d'hormone de la grossesse augmente à mesure que progresse la grossesse. Au cours de tests en laboratoire avec des échantillons d'urine pour déceler une grossesse de façon précoce, PREMIÈRE RÉPONSEMC a donné les résultats suivants :

NOMBRE DE JOURS AVANT LES RÈGLES MANQUÉES	% DES ÉCHANTILLONS DE FEMMES ENCEINTES DONNANT UN RÉSULTAT POSITIF
1	>99 %
2	>99 %
3	>99 %
4	>99 %
5	96 %
6	76 %

- Q: Quel est le degré de précision du test?
- R: Au cours d'études en laboratoire, le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSEMC est précis à >99 % à partir de la date prévue des règles. Cependant, certaines femmes enceintes peuvent ne pas avoir des quantités décelables de l'hormone de la grossesse dans leur urine le jour où elles utilisent le test ou elles peuvent avoir mal calculé le premier jour de leurs règles.
- Q: Que faire si le résultat est positif (enceinte)?
- R: Un résultat de test positif (enceinte) indique que l'hormone de la grossesse a été décelée ce qui normalement signifie une grossesse. Vous devez consulter votre médecin pour confirmer que vous êtes enceinte. Si votre test est positif mais que vous croyez ne pas être enceinte, vous devez vérifier auprès de votre médecin.
- O: Oue faire si le résultat est négatif (pas enceinte)?
- R: Il est possible que vous ne sovez pas enceinte ou qu'il soit trop tôt pour le savoir. Si vous n'avez pas vos règles dans les 7 jours suivants, vous devriez refaire le test avec un autre test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSEMC résultat précoce. Il est possible que vous avez mal calculé la longueur de votre cycle ou il est possible que votre urine ne contienne pas assez d'hormone de la grossesse pour que le test donne un résultat positif. Si après un nouveau test, vous obtenez un autre résultat négatif et si vous n'avez toujours pas vos règles, vous devriez consulter votre médecin.
- Q: J'ai attendu plus de 3 minutes et il n'y a toujours pas de lignes dans la fenêtre de résultat. Que se passe-t-il?
- R: Votre résultat devrait apparaître en 3 minutes. Il devrait y avoir au moins une ligne rose dans la fenêtre de résultat après 3 minutes pour indiquer que le test est terminé et que vous l'avez effectué correctement. Sinon le test est invalide. Cela pourrait être dû à une quantité insuffisante d'urine sur la tige absorbante ou au fait que vous n'avez pas maintenu la tige absorbante pointée vers le bas en replacant le capuchon. Vous devriez refaire le test avec un autre dispositif en suivant toutes les directives attentivement.
- Q: Le résultat changera-t-il si on laisse reposer la tige durant une certaine période de temps?
- R: Il faut lire le résultat du test aussitôt que possible après avoir attendu les 3 minutes. Un résultat négatif ne doit pas être lu après 10 minutes.
- O: Y a-t-il des médicaments ou drogues qui peuvent altérer le test?
- R: Seuls les médicaments contenant de l'hormone de la grossesse (GCh) peuvent altérer le résultat (par exemple A.P.L.¹, Pregnyl², Profasi³ et Pergonal³). Le test ne devrait pas être altéré par les traitements hormonaux contenant du citrate de clomiphène (par exemple Clomid⁴ et Serophène⁵), l'alcool, les analgésiques, les antibiotiques ou les contraceptifs.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS DÉSIREZ DISCUTER DE VOS RÉSULTATS,

Composez sans frais le 1-800-268-3186, L-V 7 h à 17 h HE.

Visitez-nous au www.premierereponse.ca

Pour augmenter vos chances d'une grossesse en santé pour vous et votre bébé, vous devriez penser à ce qui suit:

- Maintenir une alimentation bien équilibrée
- Arrêter de fumer
- Évitez les boissons alcooliques

La période entre la conception et la fin des trois premiers mois de grossesse est la période la plus importante. Vous devez consulter votre médecin régulièrement tout au long de votre grossesse pour obtenir des conseils appropriés sur les soins et l'alimentation.

Vous essavez de devenir enceinte...

Plusieurs femmes ignorent que leurs jours les plus fertiles sont les jours immédiatement avant l'ovulation (lorsque l'ovaire libère un ovule devant être fertilisé par le sperme). Pour devenir enceinte plus tôt, vous devez vous familiariser avec votre cycle d'ovulation. Le test d'ovulation facile à lire PREMIÈRE RÉPONSE^{NC} est un test en une étape, effectué à domicile, conçu pour prédire l'ovulation en surveillant les changements dans vos taux d'hormone. À l'aide du test d'ovulation facile à lire PREMIÈRE RÉPONSEME, vous pouvez déterminer vos jours de plus grande fertilité et devenir enceinte plus tôt.

Fab. par: Church & Dwight Co., Inc.,

500 Charles Ewing Blvd., Ewing, NJ 08628 USA / É.-U.

Distribué par : Church & Dwight Canada Corp. Mississauga, ON Canada L5S 0A5

PREMIÈRE RÉPONSE et le logo PREMIÈRE RÉPONSE sont des

margues de commerce de Church & Dwight Co., Inc.

- 1. A.P.L. est une marque de commerce de Wyeth-Averst Laboratories Division of American Home Products Corp., Inc.
- 2. Pregnyl est une marque déposée de Organon USA Inc.
- Profasi et Pergonal sont des marques déposées de Ares Trading SA.
- 4. Clomid est une marque déposée de Merrell Pharmaceuticals Inc.
- Serophene est une marque déposée de Serono Laboratories, Inc.