

# Test à domicile pour déceler la grossesse

# Directives et mode d'emploi

# Lire tous les renseignements dans ce feuillet avant de tester.

Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le côté de la boîte. Conserver dans un endroit sec à une température inférieure à 30 ℃ (86 °F). Ne pas congeler. Conserver hors de la portée des enfants.

## Pour usage diagnostique in-vitro. Ne pas avaler.

Si vous avez des questions, appelez sans frais au 1-800-268-3186, du lundi au vendredi de 7 h à 17 h heure de l'est. Visiter en ligne <u>www.premierereponse.ca</u>



# Quand utiliser le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSEMC résultat rapide

Vous pouvez utiliser le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSE™ résultat rapide le jour de vos règles manquées ou n'importe quel jour après. Vous pouvez utiliser le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSE™ résultat rapide à n'importe quelle heure de la journée. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la première urine du matin. Cependant, votre première urine du matin contient généralement le taux le plus élevé de l'hormone de la grossesse.

# Mode d'emploi

- Retirez le bâtonnet de test de l'emballage en aluminium et retirer le capuchon.
- En tenant le bâtonnet par la prise du pouce, pointez la tige absorbante vers le bas, et dirigez la fenêtre de résultat de l'autre côté par rapport à votre corps, placez la tige absorbante dans le jet de votre urine pendant <u>5 secondes seulement</u>. (Yous pouvez aussi recueillir de Vurine dans un gobelet propre et sec et immerger toute la tige absorbante dans l'urine pendant <u>20 secondes seulement</u>).
- La tige absorbante pointant toujours vers le bas, replacez le capuchon\*\* et posez le bâtonnet sur une surface plane, la fenêtre de résultat dirigée vers le haut.
  \*\* Il n'est pas nécessaire de replacer le capuchon pour que le test fonctionne correctement.
- Vous ne tarderez pas à voir une couleur rose se déplaçant à travers la fenêtre de résultat pour indiquer que le test fonctionne.



# LECTURE DU RÉSULTAT – LISEZ VOTRE RÉSULTAT APRÈS 45 SECONDES



#### ENCEINTE

DEUX LIGNES ROSES dans la **fenêtre de résultat**. Une ligne peut être plus pâle que l'autre.

## O. Que faire si le résultat est positif (enceinte)?

R. Rappelez-vous que ce test n'est pas conçu pour remplacer le diagnostic du médecin. Un test positif (enceinte) indique la présence de l'hormone de la grossesse (GCh). Voyez votre professionnel de la santé pour confirmer que vous êtes enceinte.



#### DAS ENCEINITE

UNE LIGNE ROSE dans la fenêtre de résultat.

#### O. Que faire si le résultat est négatif (pas enceinte)?

R. Vous n'êtes probablement pas enceinte ou c'est peut-être trop tôt. Si vous n'avez pas vos règles dans les 7 jours qui suivent, vous devriez refaire un autre test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSEMC résultat rapide. Il est possible que vous ayez mal calculé la durée de votre cycle ou que votre urine ne contienne peut-être pas assez d'hormone de la grossesse pour que le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSEMC donne un résultat positif. Si vous refaites le test encore une fois sans déceler de GCh et que vos règles ne sont pas encore apparues, vous devez consulter votre professionnel de la santé.

# **OUESTIONS ET RÉPONSES**

## O. Comment le test fonctionne-t-il?

R. Le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> résultat rapide décèle l'hormone que votre corps fabrique durant la grossesse, la GCh (gonadotrophine chorionique humaine). La quantité d'hormone de la grossesse augmente à mesure que progresse la grossesse.

# Q. Quand puis-je tester?

R. Vous pouvez utiliser le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> résultat rapide à n'importe quelle heure du jour. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la première urine du matin. Cependant, votre première urine du matin contient généralement le taux le plus élevé de l'hormone de la grossesse. Vous pouvez utiliser le test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> résultat rapide le jour de vos règles manquées ou n'importe quel jour après.

# Q. Quel est le degré de précision du test?

R. Au cours d'études en laboratoire du test de grossesse PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> résultat rapide en utilisant des échantillons prélevés chez des femmes enceintes et non enceintes, les techniciens en laboratoire ont obtenu le résultat prévu correct dans plus de 99 %\* des échantillons.

\*Précis à 99 % pour déceler l'hormone de la grossesse. Cependant, certaines femmes enceintes peuvent ne pas avoir des quantités décelables de l'hormone de la grossesse dans leur urine le premier jour de leurs règles manquées ou peuvent avoir mal calculé le premier jour de leurs règles.

# Q. J'ai attendu plus de 45 secondes et il n'y a toujours pas de lignes dans la fenêtre de résultat. Que se passe-t-il?

R. Votre résultat devrait apparaître en 45 secondes le jour de vos règles manquées. Il devrait y avoir au moins une ligne rose dans la fenêtre de résultat après 5 minutes pour indiquer que le test est terminé et que vous l'avez effectué correctement. Sinon le test est invalide. Cela pourrait être dû à une quantité insuffisante d'urine sur la tige absorbante ou au fait que vous n'avez pas maintenu la tige absorbante pointée vers le bas en replaçant le capuchon. Vous devriez refaire le test avec un autre dispositif en suivant toutes les directives attentivement.

## O. Le résultat changera-t-il si on laisse reposer la tige durant une certaine période de temps?

R. Il faut lire le résultat du test aussitôt que possible après avoir attendu 45 secondes. Un résultat positif durera au moins 48 heures. Un résultat négatif ne doit pas être lu après 10 minutes.

# Q. Y a-t-il des médicaments ou drogues qui peuvent altérer le test?

R. Seuls les médicaments contenant de l'hormone de la grossesse (GCh) peuvent altérer le résultat (par exemple Pregnyl<sup>1</sup>). Le test ne devrait pas être altéré par les traitements hormonaux contenant du citrate de clomiphène (par exemple Clomid<sup>2</sup> et Serophene<sup>3</sup>), l'alcool, les analgésiques, les antibiotiques ou les contraceptifs.

Pour augmenter vos chances d'une grossesse en santé pour vous et votre bébé, vous devriez penser à ce qui suit :

- Maintenir une alimentation bien équilibrée
- Arrêter de fumer
- Évitez les boissons alcooliques

La période entre la conception et la fin des trois premiers mois de grossesse est la période la plus importante. Vous devez consulter votre professionnel de la santé immédiatement pour obtenir des conseils appropriés sur les soins et l'alimentation.

# SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU SI VOUS DÉSIREZ DISCUTER DE VOS RÉSULTATS,

Composez sans frais le 1-800-268-3186, L-V 7 h à 17 h HE.

Visitez-nous au www.premierereponse.ca

## Vous essayez de devenir enceinte...

Plusieurs femmes ignorent que leurs jours les plus fertiles sont les jours immédiatement avant l'ovulation (lorsque l'ovaire libère un ovule devant être fertilisé par le sperme). Pour devenir enceinte plus tôt, vous devez vous familiariser avec votre cycle d'ovulation. La trousse de tests d'ovulation PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> est un test en une étape, effectué à domicile, conçu pour prédire l'ovulation en surveillant les changements dans vos taux d'hormone. À l'aide de la trousse de tests d'ovulation PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup>, vous pouvez déterminer vos jours de plus grande fertilité et devenir enceinte plus tôt.

Fab. par : Church & Dwight Co., Inc. 500 Charles Ewing Blvd., Ewing NJ 08628 USA/É.-U. Distribué par : Church & Dwight Canada Corp. Mississauga, ON Canada L5S 0A5 PREMIÈRE RÉPONSE est une marque de commerce de Church & Dwight Co., Inc.

- 1. Pregnyl est une marque déposée de Organon Inc.
- 2. Clomid est une marque déposée de Merrell Pharmaceutical.
- 3. Serophene est une marque déposée de Serono Laboratories, Inc.