



Test de grossesse DIGITAL

MODE D'EMPLOI

VEUILLEZ LIRE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE FEUILLET AVANT D'EFFECTUER LE TEST.

Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le côté de la boîte. Conserver dans un endroit sec à une température inférieure à 30 °C (86 °F). Ne pas congeler. Conserver hors de la portée des enfants. **Pour utilisation diagnostique in vitro. Ne doit pas être pris par la bouche. Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser.** Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous sans frais au 1 800 268-3186 L-V 7 h à 17 h HE. Visitez-nous en ligne à www.premierereponse.ca.

Quand utiliser le test de grossesse numérique PREMIÈRE RÉPONSE^{MC}

Le test de grossesse numérique PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} est tellement sensible qu'il peut détecter la GCh (gonatrophine chorionique humaine) aussi tôt que 6 jours avant vos règles manquées (5 jours avant le jour prévu des règles). Vous pouvez utiliser le test PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et bien qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser la première urine du matin, en général, la première urine du matin contient le taux le plus élevé de l'hormone de la grossesse.

Remarque importante concernant les résultats négatifs : certaines femmes enceintes ne pourront pas détecter la GCh dans leur urine 6 jours avant leurs règles manquées (5 jours avant le jour prévu des règles). Si votre test est négatif avant vos règles manquées et si vous croyez que vous pourriez tout de même être enceinte, vous devriez refaire le test quelques jours après vos règles manquées.

Remarque importante concernant les résultats positifs : comme ce test détecte des taux bas de GCh, il est possible que ce test vous donne des résultats positifs même si vous n'êtes pas enceinte. Si votre test est positif et si vous croyez que vous pourriez ne pas être enceinte, vous devriez consulter votre médecin.

Tous les résultats doivent être confirmés par votre professionnel des soins de santé surtout lorsqu'il faut prendre des décisions concernant des soins médicaux à venir.

MODE D'EMPLOI CE DISPOSITIF S'AUTO-ACTIVE LORSQU'IL EST RETIRÉ DE SON EMBALLAGE. NE PAS OUVRIR L'EMBALLAGE AVANT D'ÊTRE PRÊTE À L'UTILISER.

- Après avoir lu le feuillet de directives, lorsque vous êtes prête à effectuer le test, retirer le bâtonnet du test de l'enveloppe d'aluminium et retirer le **capuchon**. (Après avoir retiré le bâtonnet de l'enveloppe, vérifier si le symbole de l'horloge stable ⌚ est affiché à l'écran. Le dispositif est prêt à être utilisé. **Ne pas utiliser le test si le symbole de l'horloge stable n'est pas affiché à l'écran**)



ÉTAPE 1

SOIT

- Tenir la **prise pour le pouce** de façon à ce que la **tige absorbante** pointe vers le bas et que l'**écran** soit dirigé de l'autre côté par rapport à votre corps.
- Placer la **tige absorbante** dans votre jet d'urine durant **5 secondes**. Attention de ne pas laisser l'urine toucher le support en plastique. Durant le test, ne jamais pointer le dispositif avec la tige absorbante vers le haut.



OU

- Vous pouvez recueillir votre urine dans un récipient propre et sec et immerger la **tige absorbante** en entier dans l'urine durant 5 secondes.



LECTURE DU RÉSULTAT – LIRE VOTRE RÉSULTAT APRÈS 3 MINUTES


ÉTAPE 2

- Tenir le bâtonnet en pointant la **tige absorbante** vers le bas, replacer le **capuchon** et déposer le bâtonnet sur une surface plane, non-absorbante, l'**écran** tourné vers le haut.
- Le symbole de l'horloge ⌚ commencera à clignoter environ 30 secondes après l'application de l'urine pour indiquer que le test fonctionne.



ÉTAPE 3

- Dans environ 3 minutes, un « OUI+ » ou un « NON- » clair et précis apparaîtra à l'écran.

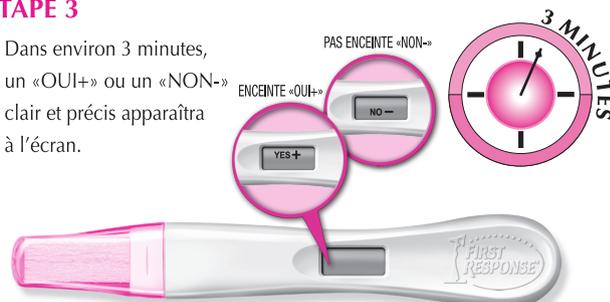

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q. Comment le test fonctionne-t-il?

R. Le test de grossesse numérique PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} détecte l'hormone que votre corps fabrique durant la grossesse, la gonadotrophine chorionique humaine (GCh).

Q. Quand puis-je tester avec le test de grossesse numérique PREMIÈRE RÉPONSE^{MC}?

R. Le test de grossesse numérique PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} est conçu pour détecter la GCh aussi tôt que 6 jours avant vos règles manquées (5 jours avant la date prévue de vos règles). La quantité d'hormone de la grossesse augmente à mesure que progresse la grossesse. Au cours de tests en laboratoire avec des échantillons d'urine pour détecter une grossesse de façon précoce, PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} a donné les résultats suivants.

NOMBRE DE JOURS AVANT LES RÈGLES MANQUÉES	% DES ÉCHANTILLONS DE FEMMES ENCEINTEES DONNANT UN RÉSULTAT POSITIF
1	>99 %
2	>99 %
3	>99 %
4	96 %
5	86 %
6	60 %

Q. Quel est le degré de précision du test?

R. PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} est précis à >99 % pour détecter l'hormone de la grossesse le jour prévu des règles au cours d'études en laboratoire. Cependant, certaines femmes enceintes peuvent ne pas avoir des quantités détectables de l'hormone de la grossesse dans leur urine le jour où elles font le test ou encore elles peuvent avoir mal calculé le premier jour de leurs règles.

Q. Que faire si le résultat à l'écran est « YES+ » (enceinte)?

R. Un résultat de test « YES+ » indique que l'hormone de la grossesse a été détectée ce qui normalement signifie une grossesse. Vous devez consulter votre médecin pour confirmer que vous êtes enceinte. Si votre test est positif mais que vous croyez ne pas être enceinte, vous devez vérifier auprès de votre médecin.

Q. Que faire si le résultat à l'écran est « NO- » (pas enceinte)?

R. Il est possible que vous ne soyez pas enceinte ou qu'il soit trop tôt pour le savoir. Si vous n'avez pas vos règles dans les 7 jours suivants, vous devriez refaire le test avec un autre test numérique PREMIÈRE RÉPONSE^{MC}. Il est possible que vous ayez mal calculé la longueur de votre cycle ou il est possible que votre urine ne contienne pas assez d'hormone de la grossesse pour que le test enregistre un « YES+ ». Si après un nouveau test, vous obteniez un autre « NO- », et si vous n'avez toujours pas vos règles, vous devriez consulter votre médecin.

Q. L'horloge clignotante ⌚ est disparue suivie d'un « ? » à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie?

R. Un symbole « ? » indique qu'une erreur est survenue durant le test. Vous devriez refaire le test avec un autre test de grossesse numérique PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} en suivant attentivement les directives.

Q. Il n'y a rien à l'écran. Qu'est-ce qui ne va pas?

R. Si l'écran ne présente plus rien à n'importe quel moment avant d'avoir donné un résultat, une erreur est survenue. Vous devriez refaire le test avec un autre test de grossesse numérique PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} en suivant attentivement les directives.

Q. Combien de temps mon résultat restera-t-il à l'écran?

R. Votre résultat restera affiché durant au moins 30 minutes. Faites la lecture du résultat durant cet espace de temps. Après avoir lu le résultat, jeter le bâtonnet. Remarque : le bâtonnet contient une pile avec un dispositif de retrait de la pile à l'endos de la prise pour le pouce. Assurez-vous de disposer de la pile conformément aux règlements locaux.

Q. Que se passe-t-il si le boîtier en plastique devient mouillé?

R. Un peu d'éclaboussures pendant que vous utilisez le test ne l'endommagera pas mais s'il devient très mouillé, il peut devenir endommagé. Si le test est endommagé, l'écran deviendra vide ou un message d'erreur « ? » apparaîtra.

Q. Y a-t-il des médicaments ou drogues qui peuvent altérer le test?

R. Seuls les médicaments contenant de l'hormone de la grossesse (GCh) peuvent altérer le résultat (par exemple A.P.L.¹, Pregnyl², Profasi³ et Pergonal³). Le test ne devrait pas être altéré par les traitements hormonaux contenant du citrate de clomiphène (par exemple Clomid⁴ et Serophene⁵), l'alcool, les analgésiques, les antibiotiques ou les contraceptifs.

Q. J'ai retiré le dispositif de son emballage et le symbole de l'horloge est apparu à l'écran; cependant je ne suis pas prête à utiliser le test. Que faire?

R. Une fois sorti de son emballage, il faut utiliser le dispositif dans les 12 heures qui suivent. Conserver le dispositif sec avant de l'utiliser.

☎ Composez sans frais le 1 800 268-3186 L-V 7 h à 17 h HE.

ou visitez-nous au www.premierereponse.ca

Pour augmenter vos chances d'une grossesse en santé pour vous et votre bébé, vous devriez penser à ce qui suit :

- n Suivre un régime alimentaire sain
- n Arrêter de fumer

La période allant de la conception à la fin du troisième mois en est une très importante. Vous devez consulter votre médecin régulièrement tout au long de votre grossesse pour obtenir des conseils appropriés sur les soins et l'alimentation.

MISE EN GARDE : selon Santé Canada, la consommation d'alcool durant la grossesse présente un danger peu importe la quantité consommée ou le moment où l'alcool est consommé.

Vous essayez de devenir enceinte...

Plusieurs femmes ignorent que leurs jours les plus fertiles sont les jours immédiatement avant l'ovulation (lorsque l'ovaire libère un ovule devant être fertilisé par le sperme).

Pour devenir enceinte plus tôt, vous devez vous familiariser avec votre cycle d'ovulation.

Le test d'ovulation facile à lire PREMIÈRE RÉPONSE^{MC} est un test en une étape, effectué à domicile, conçu pour prédire l'ovulation en surveillant les changements dans vos taux d'hormone.

À l'aide du test d'ovulation facile à lire PREMIÈRE RÉPONSE^{MC}, vous pouvez prédire vos jours de plus grande fertilité et devenir enceinte plus tôt. Selon le mode d'emploi.

PREMIÈRE RÉPONSE et I sont des marques de commerce de Church & Dwight Co., Inc. Mid / Fab. par Church & Dwight Co., Inc. 500 Charles Ewing Blvd., Ewing, NJ 08628 USAÉ.-U.

Distribué par Church & Dwight Canada Corp. Mississauga, ON Canada L5S 0A5

MC Marque de commerce de Church & Dwight Co., Inc.

www.premierereponse.ca

1 A.P.L. est une marque déposée de Wyeth-Ayerst Laboratories Division of American Home Products Corp.
 2 Pregnyl est une marque déposée de Organon, Inc.
 3 Profasi et Pergonal sont des marques déposées de Ares Trading SA
 4 Clomid est une marque déposée de Merrell Pharmaceutical
 5 Serophene est une marque déposée de Serono Laboratories, Inc.