

Le lubrifiant personnel Pre-Seed est recommandé pour les couples en désir d'enfant. Pre-Seed ne présente pas de risque pour le sperme. La composition de la formule unique de Pre-Seed, à base isotonique, est comparable aux sécrétions vaginales produites au moment de l'ovulation. Les lubrifiants classiques ne possèdent pas cette qualité et peuvent être nocifs pour le sperme. L'utilisation de lubrifiants classique est déconseillée lorsque l'on souhaite avoir un enfant.

Pre-Seed peut être déposé à l'intérieur du vagin pour imiter les sécrétions vaginales naturelles, mais peut également s'appliquer sur les zones externes pour améliorer la lubrification.


Si vous essayez d'avoir un enfant, veuillez consulter un médecin si vous n'êtes toujours pas enceinte au bout de 6 mois d'utilisation de Pre-Seed.

Pre-Seed complète les sécrétions naturelles du corps pour soulager la sécheresse vaginale, les frottements, et améliorer le confort des rapports sexuels. L'utilisation de Pre-Seed ne présente aucun risque pour les couples en désir d'enfant et peut s'appliquer sur les tissus vaginaux ou péniens pour les lubrifier et les humidier.

Conseils d'utilisation de Pre-Seed avec applicateurs jetables

- 1. Retirez la languette de protection du tube.
- 2. Pre-Seed peut s'appliquer avant le rapport sexuel. Cela permet à l'humidité de se propager dans le vagin, pour plus de spontanéité. De nombreuses femmes appliquent Pre-Seed 10 à 15 minutes avant le rapport sexuel.

- Après avoir enfoncé le piston, vissez fermement l'embout de l'applicateur sur le tube Pre-Seed (voir illustration).
- 4. Appuyez doucement sur le fond du tube pour transférer le

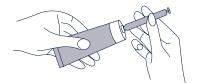

produit Pre-Seed vers l'applicateur. Maintenez la pression jusqu'à remplir l'applicateur au niveau requis. La plupart des femmes optent pour 2 ou 3 g. Dévissez l'applicateur. Veillez à maintenir l'applicateur en position verticale jusqu'à son insertion dans le vagin afin de ne pas renverser une partie du produit.

- 5. Après toute utilisation, revissez le bouchon et enroulez le tube à partir du fond. Ne laissez pas le tube Pre-Seed débouché.
- 6. Ne laissez pas Pre-Seed dans l'applicateur plus de 30 minutes avant l'application. Si vous aspirez Pre-Seed dans l'applicateur mais ne l'insérez pas à l'intérieur du vagin dans les 30 minutes suivantes, il faut jeter le produit Pre-Seed inutilisé ainsi que l'applicateur.
- 7. Pour appliquer Pre-Seed, insérez délicatement l'applicateur vers le fond du vagin. Cette opération peut s'effectuer debout, couchée, ou assise (sur les toilettes, par exemple). Si l'insertion de l'applicateur s'avère difficile ou inconfortable, ramenez-le vers la vulve et dirigez l'applicateur un peu plus au centre du vagin. Pour cela, il faut en général orienter l'applicateur un peu plus vers l'arrière lors de son insertion. Vous pouvez également utiliser vos doigts pour déposer une petite dose de Pre-Seed sur vos organes génitaux externes afin de faciliter l'insertion de l'applicateur.

8. Une fois l'applicateur dans le vagin, maintenant le réservoir de l'applicateur en place et appuyez délicatement sur le piston, jusqu'au bout, pour déposer le lubrifiant à l'intérieur du vagin (voir illustration).



- 9. Retirez les deux parties de l'applicateur du vagin.
- 10. Jetez tout de suite l'applicateur à la poubelle. NE REUTILISEZ JAMAIS DEUX FOIS LE MEME APPLICATEUR.

Si cette méthode ne vous apporte pas suffisamment de confort, nous vous conseillons d'insérer Pre-Seed dans le vagin (comme illustré) en étant couchée sur le lit, JUSTE AVANT le rapport sexuel. Vous pouvez également mettre un peu de Pre-Seed sur vos doigts pour l'appliquer directement sur les parties génitales externes.

Si cette méthode vous apporte trop de fluide, appliquez le produit un peu plus tôt avant le rapport sexuel (une heure avant, par exemple), ou utilisez moins de produit.

Conseils d'utilisation externe de Pre-Seed :

Versez quelques gouttes de Pre-Seed (l'équivalent d'un vingt-cinq cents ou une cuillère à thé) sur vos doigts et appliquez le produit sur les parties génitales. Modifiez la quantité de produit selon l'effet lubrifiant voulu. En raison de la douceur des ingrédients de Pre-Seed, il vous faudra peut-être utiliser un peu plus de produit au départ afin de saturer la peau et de prolonger la durée de lubrification.

Pre-Seed est un excellent lubrifiant même si vous n'essayez pas d'avoir un enfant! Il est compatible avec l'utilisation de préservatifs en latex et polyuréthane.

Pour les femmes qui utilisent Pre-Seed en vue d'avoir un enfant :

Consultez votre médecin si vous n'êtes toujours pas enceinte au bout de 6 mois d'utilisation du produit.

Assurance qualité:

Chaque lot de Pre-Seed est testé pour garantir les éléments suivants :

Test	Spécification
pH	de 7,0 à 7,4
Osmolalité (concentration en ions)	de 260 mOsm/kg à 370 mOsm/kg

INGRÉDIENTS: Eau purifée, hydroxyéthylcellulose, Poloxamère 407, chlorure de sodium, phosphate de sodium, carbomer, méthylparabène, hydroxide de sodium, galactoarabinane, phosphates de potassium, propylparabène

MISES EN GARDE:

- Pre-Seed n'est pas un contraceptif. Il est sans risque pour le sperme et n'affecte pas pas sa fonction.
- · A tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit si la languette de protection est cassée. Dans ce cas, renvoyez le produit au magasin.
- Pre-Seed est extrêmement glissant. Nettoyez immédiatement tout produit renversé.
- N'utilisez pas le produit en présence d'infection active ou de lésions vaginales.
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT APRES LA DATE D'EXPIRATION. La date d'expiration se situe sur le col du tube et sur l'emballage cartonné (4 chiffres pour l'année et 2 chiffres pour le mois).

ATTENTION:

En cas d'irritation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin si les symptômes persistent. **IMPORTANT:** Les applicateurs ne peuvent servir qu'une seule fois. NE REUTILISEZ PAS L'APPLICATEUR. S'il vous faut plus de lubrifiant, utilisez un autre applicateur ou appliquezle à la main.

Il n'existe pas de données disponibles concernant le nombre de grossesses viables ou d'accouchements chez les personnes ayant utilisé ce produit.

A conserver entre 2° et 30° C (entre 36° et 86° F)

Pour en savoir plus, consultez preseed.com.

Pre-Seed est une marque de commerce de Church & Dwight Co., Inc. Fab pour : Church & Dwight Co., Inc. 500 Charles Ewing Blvd. Ewing NJ USA/ÉU 08628 Distribué par Church & Dwight Canada Corp., Mississauga, ON Canada L5S 0A5 QUESTIONS? 1-800-268-3186 (L-V 9 h - 17 h HE)

Brevets américains: 7,838,509; 6,593,309; 6,140,121; et autres brevets internationaux.