

# Mode d'emploi du test de grossesse Pro numérique avec l'application Première Réponse :

- Recherchez l'appli Première Réponse et téléchargez de votre magasin d'appli.
 

DISPONIBLE SUR

Télécharger dans

Disponible sur
- Ouvrez l'appli et appuyez sur le bouton **Démarrer ma Grossesse PRO**
- Entrez votre information dans l'écran **Bienvenue** et ensuite appuyez sur le bouton **Continuer**.
- Assurez-vous que le réglage Bluetooth sur votre téléphone est en marche. Suivez les directives à l'écran pour connecter à PregPro.
- Faire le test tel qu'indiqué dans le centre des directives.
- L'assurance étape par étape du test vous fait cheminer tout au long du procédé et vous dit combien il reste de temps avant d'obtenir le résultat. Le **soutien Temps d'attente** procure des résultats intéressantes pendant que vous attendez votre résultat.
- Lorsque la minuterie du résultat est terminée, entrez votre code unique PregPro indiqué au haut de votre écran et appuyez sur le bouton **Synchroniser** pour livrer votre résultat de façon sécuritaire à l'appli Première Réponse. **Remarque :** le résultat ne s'affichera pas sur votre appareil mobile à moins d'entrer le bon code PregPro.
- Le résultat sera affiché sur le bâtonnet de test et sur votre appareil mobile. L'appli vous offre des outils et des renseignements ainsi que les prochaines étapes suggérées basées sur votre résultat.

# Grossesse PRO

## Test de grossesse numérique et accès à une application

### DIRECTIVES ET MODE D'EMPLOI

**LIRE TOUS LES RENSEIGNEMENTS DANS CE FEUILLET AVANT DE TESTER.**

- Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur le côté de la boîte.
- Conserver dans un endroit sec à une température inférieure à 30 °C (86 °F). Ne pas congeler.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Pour usage diagnostique in-vitro. Ne pas avaler.**
- Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser.**

Si vous avez des questions, appelez sans frais au 1-800-268-3186, du lundi au vendredi de 7 H à 17 H heure de l'est. Visiter en ligne [www.premierereponse.ca](http://www.premierereponse.ca)

**Quand utiliser le test de grossesse Pro numérique PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup>**

Le test de grossesse Pro numérique PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> est conçu pour détecter la GCh (gonadotrophine chorionique humaine) aussi tôt que 5 jours avant la date prévue de vos règles. Vous pouvez utiliser le test à n'importe quelle heure de la journée. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la première urine du matin. Cependant, votre première urine du matin contient généralement le taux le plus élevé de l'hormone de la grossesse.

**Remarque importante concernant les résultats négatifs :** certaines femmes enceintes ne pourront pas détecter la GCh dans leur urine 5 jours avant la date prévue de leurs règles. Si votre test est négatif avant la date prévue de vos règles et si vous croyez que vous pourriez tout de même être enceinte, vous devriez refaire le test quelques jours après la date prévue de vos règles.

**Remarque importante concernant les résultats positifs :** comme ce test détecte des taux bas de GCh, il est possible que ce test vous donne des résultats positifs même si vous n'êtes pas enceinte. Si votre test est positif et si vous croyez que vous pourriez ne pas être enceinte, vous devriez consulter votre médecin.

Tous les résultats doivent être confirmés par votre professionnel des soins de santé surtout lorsqu'il faut prendre des décisions concernant des soins médicaux à venir.

### MODE D'EMPLOI – CE DISPOSITIF S'AUTO-ACTIVE LORSQU'IL EST RETIRÉ DE SON EMBALLAGE. NE PAS OUVRIR L'EMBALLAGE AVANT D'ÊTRE PRÊTE À L'UTILISER.

Après avoir lu le feuillet de directives, lorsque vous êtes prête à effectuer le test, retirer le bâtonnet du test de l'enveloppe d'aluminium et retirer le **capuchon**. (Après avoir retiré le bâtonnet de l'enveloppe, vérifier si le symbole de l'horloge stable est affiché à l'écran. Le dispositif est prêt à être utilisé. **Ne pas utiliser le test si le symbole de l'horloge stable n'est pas affiché à l'écran.**)

**ÉTAPE 1**

**SOIT**

- Tenir la **prise pour le pouce** de façon à ce que la **tige absorbante** pointe vers le bas et que l'**écran** soit dirigé de l'autre côté par rapport à votre corps.
- Placer la **tige absorbante** dans votre jet d'urine durant **5 secondes**. Attention de ne pas laisser l'urine toucher le support en plastique. Durant le test, ne jamais pointer le dispositif avec la **tige absorbante** vers le haut.

**OU**

- Vous pouvez recueillir votre urine dans un récipient propre et sec et immerger la **tige absorbante** en entier dans l'urine durant 5 secondes.

### LECTURE DU RÉSULTAT – LIRE VOTRE RÉSULTAT APRÈS 3 MINUTES

**ÉTAPE 2**

- Tenir le bâtonnet en pointant la **tige absorbante** vers le bas, replacer le **capuchon** et déposer le bâtonnet sur une surface plane, non-absorbante, l'**écran** tourné vers le haut.
- Le symbole de l'horloge commencera à clignoter environ 30 secondes après l'application de l'urine pour indiquer que le test fonctionne.

**ÉTAPE 3**

- Dans environ 3 minutes, un «YES+ (OUI)» ou un «NO- (NON)» clair et précis apparaîtra à l'écran.

### QUESTIONS ET RÉPONSES

**Q: Comment le test fonctionne-t-il?**  
**R:** Le test de grossesse Pro numérique PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> détecte l'hormone que votre corps produit durant la grossesse, la GCh (gonadotrophine chorionique humaine).

**Q: Quand puis-je tester avec le test de grossesse PRO numérique PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup>?**  
**R:** Le test de grossesse PRO numérique PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> est conçu pour détecter la GCh aussi tôt que 5 jours avant la date prévue de vos règles. Certaines femmes enceintes peuvent ne pas avoir de quantités décelables de l'hormone de la grossesse dans leur urine le jour où elles utilisent le test. La quantité d'hormone de la grossesse augmente à mesure que la grossesse progresse. Au cours de tests en laboratoire, PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> a décelé des taux d'hormone de la grossesse chez 60 % des femmes enceintes 5 jours avant la date prévue de leurs règles, chez 86 % des femmes enceintes 4 jours avant la date prévue de leurs règles, chez 96 % des femmes enceintes 3 jours avant la date prévue de leurs règles, chez >99 % des femmes enceintes 2 jours avant la date prévue de leurs règles et chez >99 % des femmes enceintes 1 jour avant la date prévue de leurs règles et chez >99 % des femmes enceintes le jour même de la date prévue de leurs règles.

NOMBRE DE JOURS AVANT LA DATE PRÉVUE DES RÈGLES	% DES ÉCHANTILLONS DE FEMMES ENCEINTE DONNANT UN RÉSULTAT POSITIF
1	>99%
2	>99%
3	96%
4	86%
5	60%

**Q: Quel est le degré de précision du test?**  
**R:** Le test de grossesse Pro PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> est précis à >99 % pour détecter l'hormone de la grossesse le jour prévu des règles au cours d'études en laboratoire. Cependant, certaines femmes enceintes peuvent ne pas avoir de quantités décelables de l'hormone de la grossesse dans leur urine le jour où elles font le test ou encore elles peuvent avoir mal calculé le premier jour de leurs règles.

**Q: Que faire si le résultat à l'écran est « YES+ » (enceinte)?**  
**R:** Un résultat de test « YES+ » indique que l'hormone de la grossesse a été décelée ce qui normalement signifie une grossesse. Vous devez consulter votre médecin pour confirmer que vous êtes enceinte. Si votre test est positif mais que vous croyez ne pas être enceinte, vous devez vérifier auprès de votre médecin.

**Q: Que faire si le résultat est « NO- » (non enceinte)?**  
**R:** Il est possible que vous ne soyez pas enceinte ou qu'il soit trop tôt pour le savoir. Si vous n'avez pas vos règles dans les 7 jours suivants, vous devriez refaire le test avec un autre test de grossesse Pro numérique PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup>. Il est possible que vous ayez mal calculé la longueur de votre cycle ou il est possible que votre urine ne contienne pas assez d'hormone de la grossesse pour que le test donne un résultat positif «YES+ (OUI)». Si après un nouveau test, vous obtenez un autre résultat négatif «NO- (NON)» et si vous n'avez toujours pas vos règles, vous devriez consulter votre médecin.

**Q: L'horloge clignote et est disparue et a été suivie d'un « ? » sur l'écran d'affichage. Qu'est-ce que ça veut dire?**  
**R:** Un symbole « ? » indique qu'une erreur est survenue durant le test. Vous devez refaire le test avec un autre test de grossesse Pro numérique PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> en suivant toutes les directives attentivement.

**Q: Il n'y a rien à l'écran. Qu'est-ce qui ne va pas?**  
**R:** Si l'écran ne présente plus rien à n'importe quel moment avant d'avoir donné un résultat, une erreur est survenue. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro ci-dessous.

**Q: Combien de temps mon résultat restera-t-il à l'écran?**  
**R:** Votre résultat restera affiché durant au moins 30 minutes. Faites la lecture du résultat durant cet espace de temps. Après avoir lu le résultat, jeter le bâtonnet. Remarque : le bâtonnet contient une pile avec un dispositif de retrait de la pile à l'endos de la prise pour le pouce. Assurez-vous de disposer de la pile conformément aux règlements locaux.

**Q: Que se passe-t-il si le boîtier en plastique devient mouillé?**  
**R:** Un peu d'éclaboussures pendant que vous utilisez le test ne l'endommagera pas mais s'il devient très mouillé, il peut devenir endommagé. Si le test est endommagé, l'écran deviendra vide ou un message d'erreur « ? » apparaîtra.

**Q: Y a-t-il des médicaments ou drogues qui peuvent altérer le test?**  
**R:** Seuls les médicaments contenant de l'hormone de la grossesse (GCh) peuvent altérer le résultat (par exemple A.P.L., Pregnyl®, Profasi® et Pergonal®). Le test ne devrait pas être altéré par les traitements hormonaux contenant du citrate de clomiphène (par exemple Clomid® et Serophene®), l'alcool, les analgésiques, les antibiotiques ou les contraceptifs.

**Q: J'ai retiré le dispositif de son emballage et le symbole de l'horloge est apparu à l'écran; cependant je ne suis pas prête à utiliser le test. Que faire?**  
**R:** Une fois sorti de son emballage, il faut utiliser le dispositif dans les 12 heures qui suivent. Conserver le dispositif sec avant de l'utiliser.

Si vous avez des questions, appelez sans frais au **1-800-268-3186**, du lundi au vendredi de 7 H à 17 H heure de l'est. Visiter en ligne [www.premierereponse.ca](http://www.premierereponse.ca)

**Pour augmenter vos chances d'une grossesse en santé pour vous et votre bébé, vous devriez penser à ce qui suit :**

- Suivre un régime alimentaire sain
- Arrêter de fumer

La période allant de la conception à la fin du troisième mois en est une très importante. Vous devez consulter votre médecin régulièrement tout au long de votre grossesse pour obtenir des conseils appropriés sur les soins et l'alimentation.

**MISE EN GARDE :** selon Santé Canada, la consommation d'alcool durant la grossesse présente un danger peu importe la quantité consommée ou le moment où l'alcool est consommé.

**Vous essayez de devenir enceinte...**

Plusieurs femmes ignorent que leurs jours les plus fertiles sont les jours immédiatement avant l'ovulation (lorsque l'ovaire libère un ovule devant être fertilisé par le sperm). Pour devenir enceinte plus tôt, vous devez vous familiariser avec votre cycle d'ovulation. Le test d'ovulation facile à lire PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup> est un test en une étape, effectué à domicile, conçu pour prédire l'ovulation en surveillant les changements dans vos taux d'hormone. À l'aide du test d'ovulation facile à lire PREMIÈRE RÉPONSE<sup>MC</sup>, vous pouvez prédire vos jours de plus grande fertilité et devenir enceinte plus tôt.

**Renseignements de Industrie Canada**

Des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'opérer cet équipement.

Ce dispositif est conforme aux Cahiers de Charges sur les Normes Radioélectriques (CNR) d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage; (2) le dispositif doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil a été testé aux limites des dispositifs numériques de Classe B, conformément aux CNR d'Industrie Canada. Ces limites sont conçues pour procurer une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil utilise et irradie de l'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio ou être perturbé par celle-ci. Il n'existe pas de garantie que l'interférence surviendra dans une installation particulière.

**Mise en garde :** ce dispositif ne doit pas être utilisé dans les avions, hôpitaux ou autres endroits où le téléphone cellulaire ou autres dispositifs électroniques sont interdits.

Brevets U.S. No 6,767,714; 7,214,542; 7,220,597; 7,499,170; 7,776,618; 8,211,711; 8,268,636; 8,623,635; 8,722,395; 8,999,728; 8,828,329 et brevets en instance.

†† Pour obtenir une liste des appareils intelligents compatibles avec Bluetooth, visiter <http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Smart-Devices-List.aspx>

PREMIÈRE RÉPONSE et sont des marques de commerce de Church & Dwight Co., Inc.

Fab. pour : Church & Dwight Co., Inc. 500 Charles Ewing Blvd., Ewing, NJ 08628 USA/É.-U.

Distribué par Church & Dwight Canada Corp. Mississauga, ON Canada L5S 0A5

MC Marque de commerce de Church & Dwight Co., Inc.

Modèle No FRPTK1

- A.P.L. est une marque déposée de Wyeth-Averst Laboratories Division of American Home Products Corp.
- Pregnyl est une marque déposée de Organon, Inc.
- Profasi et Pergonal sont des marques déposées de Ares Trading SA
- Clomid est une marque déposée de Merrell Pharmaceutical
- Serophene est une marque déposée de Serono Laboratories, Inc.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Church & Dwight Co., Inc., se fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propres propriétaires.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux É.U. et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. Google Play est une marque de commerce de Google Inc.

La marque de commerce Amazon est utilisée sous licence de Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

Dans l'appli Première Réponse, appuyer sur **Comment faire?** Pour obtenir un guide de dépannage ou, si vous avez besoin de plus d'aide, appuyer sur **Plus d'aide** pour appeler le service à la clientèle sans frais 1-800-268-3186, du lundi au vendredi, de 7 H à 17 H heure de l'est.

Des Questions et réponses additionnelles sont disponibles dans l'appli Première Réponse.